


AGRelux アグリラックス ネックブレーサー

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

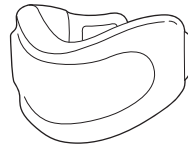

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

●本製品を分解したり改造したりしないでください。●過度の衝撃や振動を与えないでください。●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。●ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。●鋭利な物や針を製品に刺さないでください。●破損したまま使用しないでください。●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

⚠ 注意

●就寝時は使用しないでください。●首の痛みなどがある方、首に炎症のある方は使用しないでください。●アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方は使用しないでください。●長時間着用される時は、適度に脱着を行ってください。●飲酒後や体調不良時などは使用しないでください。●本製品を首以外には使用しないでください。●本来の目的以外に使用しないでください。●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用方法

1 本体を首に巻き、凹んでいる部分が顎の下に来るように位置を調整します。




2 首の後ろで面ファスナーを止めて、適切な締め具合に調整します。締めすぎないように注意し、快適な装着感を確認してください。

3 固定され、動いてもずれないことを確認します。必要に応じて、再度面ファスナーで調整してください。



お手入れ方法

●本体は洗濯することはできません。汚れた場合は、お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。●布カバーは洗濯することができますが、素材の性質上引っ掛かりやすいため、鋭利なものと一緒に洗濯をしないでください。必ず洗濯ネットに入れてから洗濯をしてください。

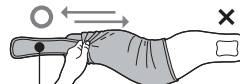

布カバーを本体から取り外す際は面ファスナー側から取り外してください

仕様

商品名	AGRelux アグリラックス ネックブレーサー
型番	3R-AGN01
サイズ(約)	長さ 477mm × 幅 30mm × 高さ 130mm ※面ファスナー部を除く
重量(約)	60g
材質	本体(表地):ナイロン89%/ポリウレタン11% 内材:ポリウレタン/EVA
付属品	布カバー、収納袋

サポート

製品保証

ご購入から3カ月間

※下記症状は保証対象外となります。
●通常使用ではできない汚れ、キズ、破れ、摩擦による擦れ、縫い目のほつれなど。●火災、地震、水害などの自然災害により発生した破損、不具合。
※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。
※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のために画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077