

ワイヤレスカメラつき耳かき BEBIRD R1



2021.01.08
第1版

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 必要以上に強い力を加えて使用しないでください。
- 耳に異常がある際は使用しないでください。
- 医師の治療を受けている際は、医師の指示に従って使用してください。
- ご使用後、耳に異常を感じた際は、医師の治療を受けてください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 耳の奥に入れすぎないようにしてください。
- 耳の中を傷つけないように使用してください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。
- ・本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。

技適マーク



電波に関する注意事項

- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.412GHz~2.472GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
- 本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。
- この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。
- その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して


製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

各部の名称

先端

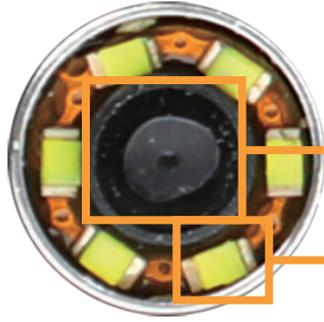


カメラ

LED×6

本体



● 耳かきキャップ ×2

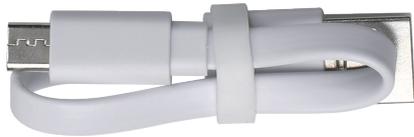

● microUSB ケーブル

電源ボタン



ソケット

使用方法

【ご使用の前に】

この取扱説明書の内容は、

iOS: アプリバージョンV4.3.12、iOS14.2

Android: アプリバージョンV5.6.42、Android 8.0

の仕様に基づいて構成されています。今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品には専用のアプリが必要です。



左記QRコードを読み取り、Webページにアクセスします。
使用するデバイスのOSを選択し、アプリをダウンロード、インストールしてください。
(各アプリストアで「bebird」と検索することでもダウンロードができます。)

【充電する】

付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグをお手持ちのACアダプタに接続してください。

microUSBプラグを本体のソケットに接続してください。

充電が開始されると、電源ボタンが赤点灯します。

満充電になると、電源ボタンが消灯します。

充電時間は約30分です。

【耳かきキャップを取り付ける】

耳かきキャップを本体の先端に奥までスライドさせて取り付けます。

取り付け後、耳かきキャップが簡単に外れないことを確認してください。

※万一、耳かきキャップが耳の中で外れて取れなくなった場合は医師の治療を受けてください。

【電源を入れる】

電源ボタンを長押しして、電源を入れます。

電源が入るとボタンが青色に点灯、その後点滅し、本体先端のLEDが点灯します。

電源ボタン点滅中は接続先を探している状態、点灯中は接続中を示しています。

使用方法 (iOS 端末)

① デバイス本体のWi-Fi設定画面を開きます。

ネットワーク一覧から「bebird」で始まるネットワークに接続してください。(画像1)

※ 製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。


※ 表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。




② 接続完了後、「bebird」のアプリを開きます。

③ 「ローカルネットワークデバイスの検索および接続」を求められますので「OK」を選択します。(画像2)

※ この設定は製品本体と接続するために必ず必要です。

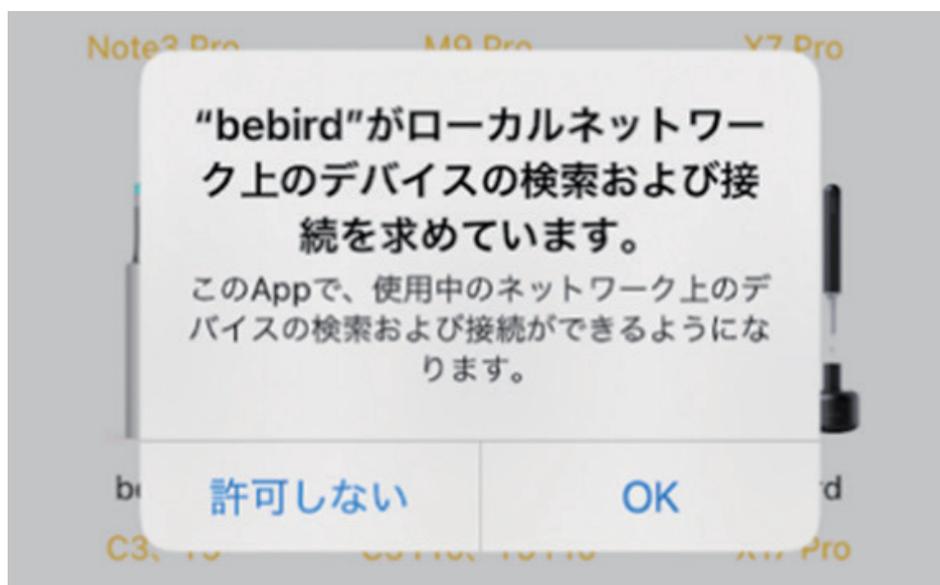

④使用する製品を選択します。
本製品は「R1」です。(画像3)

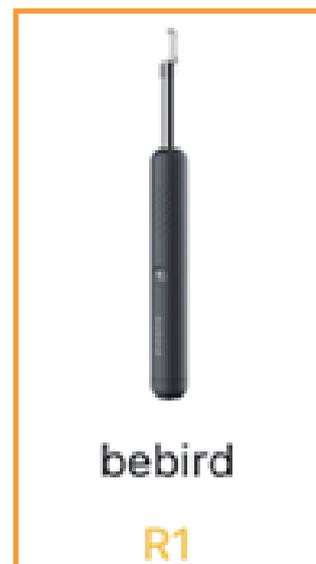

(画像3)

⑤画面の注意文に従って次に進んでください。

⑥製品への接続が完了している場合は「接続しました」と表記され、バッテリー残量と使用可能時間が表示されています。(画像4)

※バッテリー残量、使用可能時間は目安です。正確なものではありません。



(画像4)


接続が完了していない場合は①の手順に戻り、
製品へ接続してください。

⑦接続が完了した状態で開始ボタンをタップすると、カメラの映像が表示されます。(画像5)



(画像5)

画面表示の説明

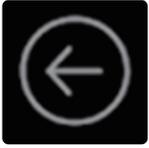

前のページに戻ります。




画面表示をバッテリー残量表示だけにします。



製品本体のバッテリー残量を示します。



広域を表示させるモードです。

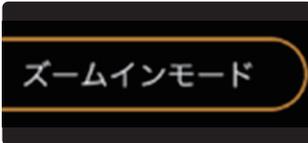

ズームして表示させるモードです。



画面表示を縦or横に切り替えます。



右耳モード(正転)と左耳モード(反転)を切り替えます。



写真を撮影します。撮った写真は製品のアルバムに保存されます。



動画を撮影します。撮った映像は製品のアルバムに保存されます。



製品で撮影した画像や映像を確認できます。

必要に応じて設定を変更し、耳かきを使用してください。

⑧使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります。

使用方法 (Android 端末)

① デバイス本体のWi-Fi設定画面を開きます。

ネットワーク一覧から「bebird」で始まるネットワークに接続してください。(画像6)

※ 製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。

※ 表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。



(画像6)

② 接続完了後、「bebird」のアプリを開きます。

③ ストレージへのアクセス権限に関する確認画面が開きます。(画像7)

※ 許可しない場合はカメラで撮影した画像や動画を保存できません。




(画像7)

使用方法 (iOS 端末)

④ 位置情報の使用許可に関する確認画面が開きます。(画像8)

※位置情報は無線LANの取得のために必要な場合があります。

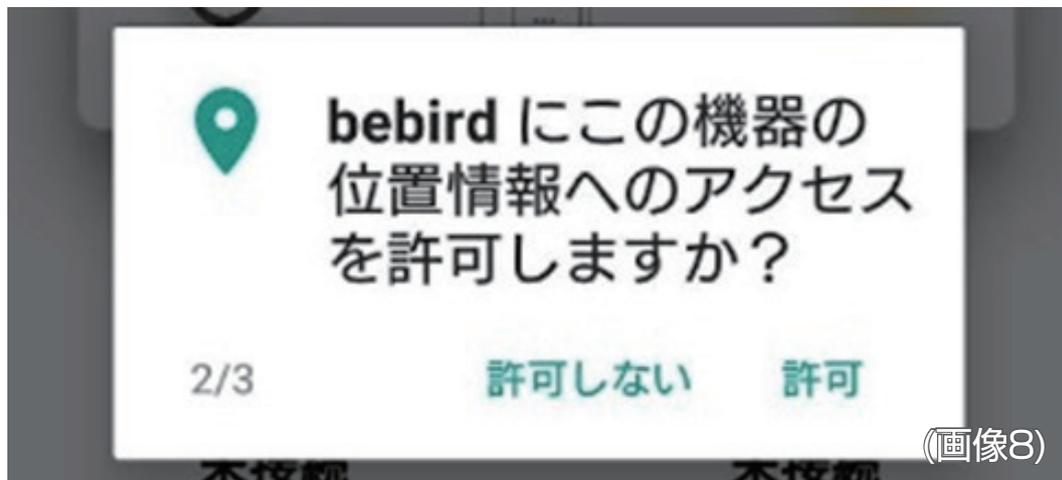

⑤ 音声録音の使用許可に関する確認画面が開きます。(画像9)

※本製品は録音機能はありませんので、許可しなくても問題ありません。

※他の耳かきデバイスで、録音機能が搭載されているものがあるために表示されています。



⑥使用する製品を選択します。
本製品は「R1」です。(画像10)



(画像10)

⑦画面の注意文に従って次に進んでください。

⑧製品への接続が完了している場合は「接続しました」と表記され、バッテリー残量と使用可能時間が表示されています。(画像11)

※バッテリー残量、使用可能時間は目安です。正確なものではありません。



バッテリー残量	使用可能時間
100%	30 min

(画像11)

接続が完了していない場合は①の手順に戻り、
製品へ接続してください。

⑨接続が完了した状態で開始ボタンをタップすると、カメラの映像が表示されます。(画像12)



(画像12)

画面表示の説明



前のページに戻ります。



画面表示をバッテリー残量表示だけにします。



製品本体のバッテリー残量を示します。



広域を表示させるモードです。



ズームして表示させるモードです。




画面表示を縦or横に切り替えます。



右耳モード(正転)と左耳モード(反転)を切り替えます。



写真を撮影します。撮った写真は製品のアルバムに保存されます。

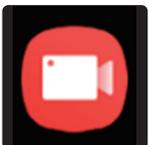

動画を撮影します。撮った映像は製品のアルバムに保存されます。




製品で撮影した画像や映像を確認できます。

必要に応じて設定を変更し、耳かきを使用してください。

⑩使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります。


アプリ画面の説明

●メイン画面(接続時)

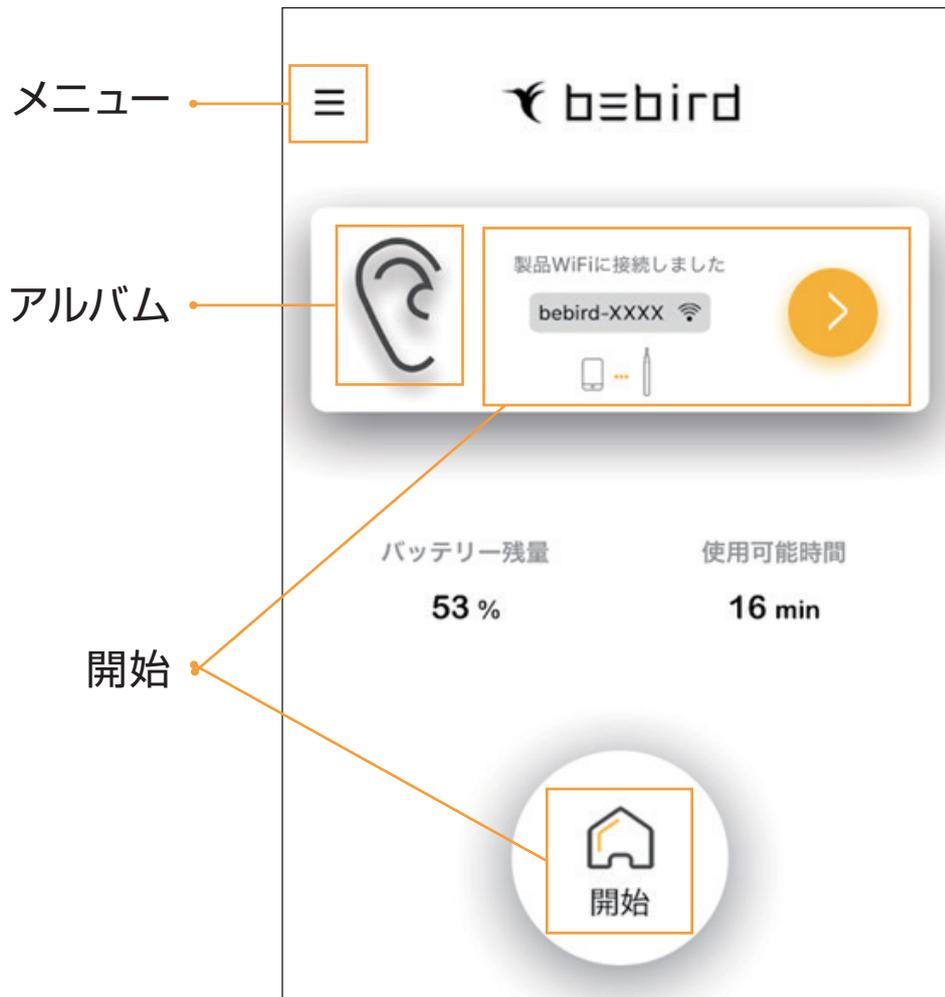

-  メニュー … メニュー画面を開きます。
-  アルバム … アルバムを開きます。
-  開始 … 耳かき使用画面に移行します。

●メニュー画面

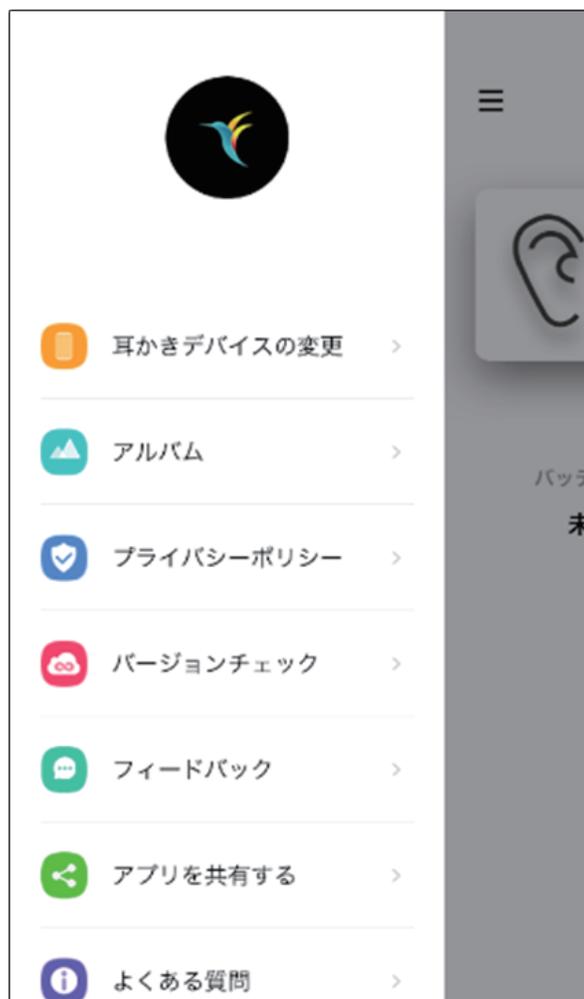

耳かきデバイスの変更

耳かきデバイスを変更することができます。誤ってR1以外のデバイスを選択した場合はここからR1を選択してください。

アルバム

本製品で撮影した画像や動画を確認することができます。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーを表示します。

バージョンチェック

バージョンが最新かどうかチェックできます。

フィードバック

不具合があればこちらから報告することができます。

アプリを共有する

アプリを共有します。

よくある質問

よくある質問や使用に関するヒントを表示します。

お手入れ方法

使用後は綿棒またはやわらかい布を使用して耳かきキャップ、カメラ部分を清掃してください。

アルコールも使用できます。

お手入れ後はホコリやゴミなどの付着を防ぐため、パッケージに収納してください。

※本製品は防水仕様ではありません。水に浸して清掃しないでください。

※カメラ部分を清掃する際は力を入れすぎないように注意してください。

製品仕様

商品名	ワイヤレスカメラつき耳かき BEBIRD R1
型番	3R-BBD01
本体サイズ	約 13×13×145mm
本体重量	約 13g
入力電圧 / 電流	約 5V/0.3A
充電時間	約 30 分間
連続動作時間	約 30 分間
レンズ直径	4.5mm
画素数	300 万画素
付属品	microUSB ケーブル 耳かきキャップ ×2 取扱説明書

製品保証:ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口
もしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階