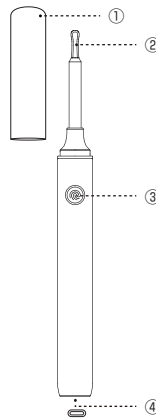
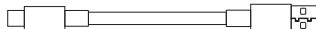
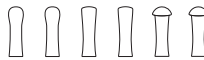
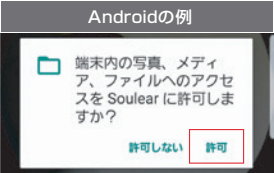


取扱説明書 型番：3R-BBD02 ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ  このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。 ※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。 ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。 ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。 安全上のご注意 警告 ●必要以上に強い力を加えて使用しないでください。 ●耳に傷や腫れなどがある場合は使用しないでください。 ●医師の治療を受けている際は、医師の指示に従って使用してください。 ●ご使用後、耳に異変を感じた際は、医師の治療を受けてください。 ●本製品を分解したり改造したりしないでください。 ●過度の衝撃や振動を与えないでください。 ●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。 ●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。 ●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。 ●ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。 ●破損したまま使用しないでください。 ●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。 ●万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。 安全上のご注意 つづき 注意 ●耳の奥に入れすぎないようにしてください。 ●耳の中を傷つけないように使用してください。 ●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。 ●本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。 ●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 ●ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。 ●OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。 ●本来の目的以外に使用しないでください。 ●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。 使用上のご注意 ●カバーが耳の中で外れて取れなくなった場合は医師の治療を受けてください。 ●バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。 ●本製品は充電しながらの使用が可能です。が、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。 ●長時間、直接光源を見ないでください。 ●ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。 ●本体と接続中は、外部とのネットワークが遮断されます。インターネットなどの閲覧ができなくなりますのでご注意ください。 技術マーク 技術基準適合証明  210-123818 電波に関する注意事項 ●本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。 電波に関する注意事項 つづき ●本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.412GHz～2.472GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。 ●本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。 ●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。 ●その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。 各部の名称  ①キャップ ②耳かき部 ※カバー装着済み ③電源ボタン ④ソケット ⑤LED ⑥カメラ 付属品 ⑦充電ケーブル  ⑧カバー各種 ※カバーは3種類、各2個あります。うち1個は装着済みです。  使用方法 ご使用前に この取扱説明書の内容は、 iOS アプリバージョン1.0.12、iOS16.3.1 Android アプリバージョン1.0.017、Android 9 の仕様に基づいて構成されています。 今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 本製品には専用のアプリが必要です。  上記QRコードを読み取り、Webページにアクセスします。 使用するデバイスのOSを選択し、アプリをダウンロード、インストールしてください。 または各アプリストアで「soulear」と検索し、アプリをダウンロード、インストールしてください。	使用方法 つづき 充電する 付属の充電ケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。 もう一方のプラグを本体のソケットに接続してください。 充電が開始されると電源ボタンが赤点灯します。 充電が完了すると電源ボタンが青点灯します。充電は約50分間で完了します。 耳かき部のカバーを付け替える カバーは付け替えが可能です。 付け替える際は以下の手順でカバーを付け替えてください。 ①耳かき部からカバーを引っ張って取り外します。 ②カバーケースからお好みの形のカバーを取り出してください。 ③カバーを耳かき部の奥まで装着してください。 ④装着後、カバーが簡単に外れないことを確認してください。 ※付け替えの際、耳かき部のお手入れをすることをお勧めします。後述の「お手入れ方法」をご参照ください。 7	使用方法 つづき 電源を入れる 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。電源が入ると電源ボタンが青色に点灯、その後点滅します。 本体先端のLEDは点灯します。 ※電源を入れた後、電源ボタンは点滅しますが、これは接続先を探している状態です。 ※接続が完了すると電源ボタンは点灯します。 ①スマートフォンのWi-Fi設定画面を開きます。ネットワーク一覧より「Soulear」から始まるネットワークに接続してください。 8	使用方法 つづき ※製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。 ※表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。 ※接続が上手くいかない場合は、スマートフォンを機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。 ②接続完了後、「Soulear」のアプリを開きます。 ③「ローカルネットワークデバイスの検索および接続」を求められた場合は「許可」を選択します。 ④接続が完了すると自動的に画面が切り替わり、カメラの映像が表示されます。自動的に画面が切り替わらない場合は「接続済み」の箇所をタップしてください。 9	使用方法 つづき カメラ映像 切り替わらない場合 カメラ映像画面の説明 タップすると前のページに戻ります。 タップするとロック画面になり画面表示が少なくなります。 製品本体のバッテリー残量を示します。充電中の場合は⚡マークになります。 タップすると右耳モードと左耳モードを切り替えます。それぞれ左右反転した表示になります。 10	使用方法 つづき ⑤カメラの映像を見ながら耳かきを使用してください。 ⑥使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。 ※機内モードにした場合は、機内モードを解除してください。 お手入れ方法 お手入れの際は必ず本体の電源をオフにしてください。 ●水洗い可能 ・レンズ含む先端部分 ・カバー 水洗い後、乾いた柔らかい布で水気を取ってください。 ●水洗い不可能 ・先端部分以外 お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。 ご使用済みの製品の廃棄に関して 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。 このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。 MAIL product-support@3rrr-hd.jp 12	仕様 商品名 ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ 型番 3R-BBD02 サイズ 約14×14×151mm ※キャップ装着時 重量 約19g 入力電圧 / 電流 5.0V / 0.4A 充電時間 約50分間 連続動作時間 約50分間 画素数 100万画素 付属品 充電ケーブル、カバー各種 サポートおよび企業情報 製品保証：ご購入日から6ヶ月間 ※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。 製品に関するお問い合わせ先 ※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。 product-support@3rrr-hd.jp 092-260-3033 FAX 092-260-8506 スリーアール スリーアール株式会社 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階 WEB：https://3rrr-hd.jp/ 第1版 2023.2.27 13
---	--	---	--	---	--	--

使用方法 つづき 充電する 付属の充電ケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。 もう一方のプラグを本体のソケットに接続してください。 充電が開始されると電源ボタンが赤点灯します。 充電が完了すると電源ボタンが青点灯します。充電は約50分間で完了します。 耳かき部のカバーを付け替える カバーは付け替えが可能です。 付け替える際は以下の手順でカバーを付け替えてください。 ①耳かき部からカバーを引っ張って取り外します。 ②カバーケースからお好みの形のカバーを取り出してください。 ③カバーを耳かき部の奥まで装着してください。 ④装着後、カバーが簡単に外れないことを確認してください。 ※付け替えの際、耳かき部のお手入れをすることをお勧めします。後述の「お手入れ方法」をご参照ください。 7	使用方法 つづき 電源を入れる 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。電源が入ると電源ボタンが青色に点灯、その後点滅します。 本体先端のLEDは点灯します。 ※電源を入れた後、電源ボタンは点滅しますが、これは接続先を探している状態です。 ※接続が完了すると電源ボタンは点灯します。 ①スマートフォンのWi-Fi設定画面を開きます。ネットワーク一覧より「Soulear」から始まるネットワークに接続してください。   8	使用方法 つづき ※製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。 ※表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。 ※接続が上手くいかない場合は、スマートフォンを機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。 ②接続完了後、「Soulear」のアプリを開きます。 ③「ローカルネットワークデバイスの検索および接続」を求められた場合は「許可」を選択します。  ④接続が完了すると自動的に画面が切り替わり、カメラの映像が表示されます。自動的に画面が切り替わらない場合は「接続済み」の箇所をタップしてください。 9	使用方法 つづき カメラ映像  切り替わらない場合  カメラ映像画面の説明  タップすると前のページに戻ります。  タップするとロック画面になり画面表示が少なくなります。  製品本体のバッテリー残量を示します。充電中の場合は⚡マークになります。  タップすると右耳モードと左耳モードを切り替えます。それぞれ左右反転した表示になります。 10	使用方法 つづき 撮影 タップすると写真を撮影します。撮影した写真は本アプリのアルバムに保存されます。 ビデオ タップするとビデオを撮影します。撮影したビデオは本アプリのアルバムに保存されます。 アルバム 撮影した写真やビデオを見ることができます。 写真へのアクセス許可をするとスマートフォン本体のアルバムに保存できます。 iOSの例  Androidの例  11	使用方法 つづき ⑤カメラの映像を見ながら耳かきを使用してください。 ⑥使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。 ※機内モードにした場合は、機内モードを解除してください。 お手入れ方法 お手入れの際は必ず本体の電源をオフにしてください。 ●水洗い可能 ・レンズ含む先端部分 ・カバー 水洗い後、乾いた柔らかい布で水気を取ってください。 ●水洗い不可能 ・先端部分以外 お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。 ご使用済みの製品の廃棄に関して 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。 このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。 MAIL product-support@3rrr-hd.jp 12	仕様 商品名 ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ 型番 3R-BBD02 サイズ 約14×14×151mm ※キャップ装着時 重量 約19g 入力電圧 / 電流 5.0V / 0.4A 充電時間 約50分間 連続動作時間 約50分間 画素数 100万画素 付属品 充電ケーブル、カバー各種 サポートおよび企業情報 製品保証：ご購入日から6ヶ月間 ※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。 製品に関するお問い合わせ先 ※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。  product-support@3rrr-hd.jp  092-260-3033  FAX 092-260-8506  スリーアール スリーアール株式会社 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階 WEB：https://3rrr-hd.jp/ 第1版 2023.2.27 13
--	---	--	---	--	--	--