

血流スコープ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 目に光を当て続けしないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

重要

オイルを塗りすぎないでください。使用後は本体を下に向けたままにして、必ずオイルを拭き取ってください。
オイルが付着したまま本体を横に向けたり逆さにすると、製品内にオイルが浸入し、故障する恐れがあります。

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも1ヶ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 本体と接続中は、外部とのネットワークが遮断されます。インターネットなどの閲覧ができなくなりますのでご注意ください。

電波に関する注意事項

- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.412GHz～2.472GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
- 本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。
- この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。
- その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。


各部の名称

正面

上部



レンズ部

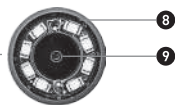

① 電源ボタン/撮影ボタン 電源のON/OFF、静止画の撮影時に使用	⑦ レンズカバー
② USBソケット 本体の充電またはPCとの接続時に使用	⑧ LEDライト(白色8灯)
③ 調光ダイヤル LEDライトの明るさを調整	⑨ カメラレンズ
④ 倍率調整ダイヤル 倍率変更に使用	⑩ Wi-Fiインジケータ
⑤ ズームインボタン デジタルズーム時に使用(4段階)	⑪ バッテリーインジケータ
⑥ ズームアウトボタン デジタルズーム時に使用(4段階)	

使用方法

ご使用の前に

この取扱説明書の内容は、

iOS: アプリバージョン3.0、iPad OS 17.5.1

Android: アプリバージョン2.12.37、Android 9

の仕様に基づいて構成されています。

今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

本製品には専用のアプリが必要です

各アプリストアで「Max-see」と検索し、アプリをダウンロード、インストールしてください。



使用方法（つづき）

充電する

付属のUSBケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

もう一方のプラグを本体のソケットに接続してください。

- 充電が開始されるとバッテリーインジケータが赤点灯します。
- 充電が完了するとバッテリーインジケータが緑点灯します。
- 充電は約1時間で完了します。
- バッテリー残量が無くなると、バッテリーインジケータが赤点滅します。

【充電中】



赤点灯

【充電完了】



緑点灯

※ バッテリー電圧が下がると正常動作が保証できませんので、再充電を行ってください。

接続する

1. 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。
電源が入るとWiFiインジケータが青色に点滅します。

本体先端のLEDが点灯します。

※ 電源を入れた後、Wi-Fiインジケータが青点滅しますが、接続先を探している状態です。

※ 接続が完了するとWi-Fiインジケータが青点灯します。



電源ボタン

使用方法（つづき）

2. タブレット・スマートフォン のWi-Fi設定画面を開きます。ネットワーク一覧より「Max-see」から始まるネットワークに接続してください。



- ※製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。
- ※表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。
- ※接続が上手くいかない場合は、タブレット・スマートフォン を機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。

使用方法（つづき）

3. 接続完了後、「Max-see」アプリを開きます。

タブレット・スマートフォンのディスプレイに映像が表示されます。

使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。

※機内モードにした場合は、機内モードを解除してください。

※端末内の写真、メディア、ファイルへのアクセス許可を求められた場合は「許可」を選択します。

【iOSの場合】



【Androidの場合】



血管を観察する

オイルを準備する

1. 指爪根本の毛細血管を観察するためには、観察部位へのオイル塗布が必須となります。

⚠ 注意

※以下のオイルが使用できます。別途ご準備ください。

ベビーオイル

サラダオイル

オリーブオイル

オイルを塗る

薬指の爪の付け根のあま皮部分下(斜線で示す位置)に少量のオイルを塗ってください。

※利き手と逆の薬指に塗ることを推奨いたします。



⚠ 注意

※オイルの塗りすぎにご注意ください。

重要

オイルを塗りすぎないでください。使用後は本体を下に向けたままにして、必ずオイルを拭き取ってください。
オイルが付着したまま本体を横に向けたり逆さにすると、製品内にオイルが浸入し、故障する恐れがあります。

血管を観察する（つづき）

観察する

- 撮影画像を見ながら、倍率調整ダイヤルを高倍率側(右記矢印方向)へ回して、ピントを合わせます。

※本製品は、倍率調整ダイヤルで焦点が合う箇所が2つあります。血管を観察する際は、高倍率側でピントを合わせてください。



- 必要に応じて調光ダイヤルを回してライトの強さを調整してください。



血管を観察する（つづき）

カメラ映像画面の説明



① 静止画撮影

② 解像度変更

保存する静止画/動画の解像度を変更 (640×480、1280×720、1920×1080)

※640×480以外に設定しても、画質が上がるわけではありません。

※映像を表示させる端末の解像度に合わせて変更してください。

③ 180°回転

映像を180°回転

④ 動画撮影

⑤ ストレージ

撮影し保存した静止画及び動画を確認


※撮影した静止画及び動画は、接続した端末の内部ストレージに保存

⑥ リアルタイム映像

血管を観察する（つづき）

PCと接続する

- 本製品はPCと接続して映像を見ることができます。
- PCと接続する場合は、本体の電源を入れてから、付属のUSBケーブルで本体とPCを接続して、標準のカメラアプリなど、外付けカメラを認識できるアプリを起動してください。

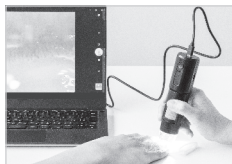

※PCのインカメラなど別のカメラの映像が表示される場合は、カメラを切り替えてください。

※PCと接続している際は、スマホやタブレット等と接続はできません。

お手入れ方法

重要

ご使用後は、必ずレンズを下に向けた状態で、綿棒や柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
※オイルが付着したままの状態でご保管しないでください。

- 必ず本体の電源をオフにしてください。
- 本体が汚れた際は、お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

製品名	血流スコープ
型番	3R-BFS01-CV
サイズ（約）	長さ 140mm、直径（最大）36mm
重量（約）	74g ※レンズカバー含む
材質	ABS+PC
動作時間	約 2 時間
充電時間	約 1 時間
入力電圧 / 電流	5.0V/0.7A
カメラ画素数	30 万画素
光学倍率	44 倍 / 155 倍 ※モニタサイズ:10.2 インチにおける倍率
バッテリー容量	550mAh
対応 OS	iOS9 ~ 18 Android5 ~ 14 Windows10/11 Mac OSX10.8 ~ 15
付属品	USB ケーブル ※AC アダプタは付属しておりません

※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。指定されたスペックを満たす場合でも環境やその他の仕様により問題が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

サポート及び企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認くださいませ。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>