




口腔内カメラ

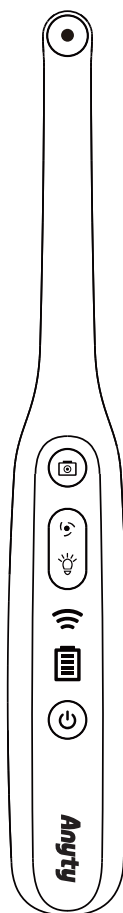

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 必要以上に強い力を加えて使用しないでください。
- 口腔内に傷や腫れなどがある場合は使用しないでください。
- 医師の治療を受けている際は、医師の指示に従って使用してください。
- ご使用後、口腔内に異変を感じた際は、医師の治療を受けてください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

安全上のご注意・つづき

注意

- 口腔内の奥に入れすぎないようにしてください。
- 口腔内を傷つけないように使用してください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- OSのバージョンアップによる動作不良は保証外です。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
- 本製品を用いて診断するなどの医療行為にはご利用いただけません。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3カ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 本体と接続中は、外部とのネットワークが遮断されます。インターネットなどの閲覧ができなくなりますのでご注意ください。

技適マーク

技術基準適合証明



R 210-123818

電波に関する注意事項

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.412GHz～2.472GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。


本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。

病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。

この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。


その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。

各部の名称

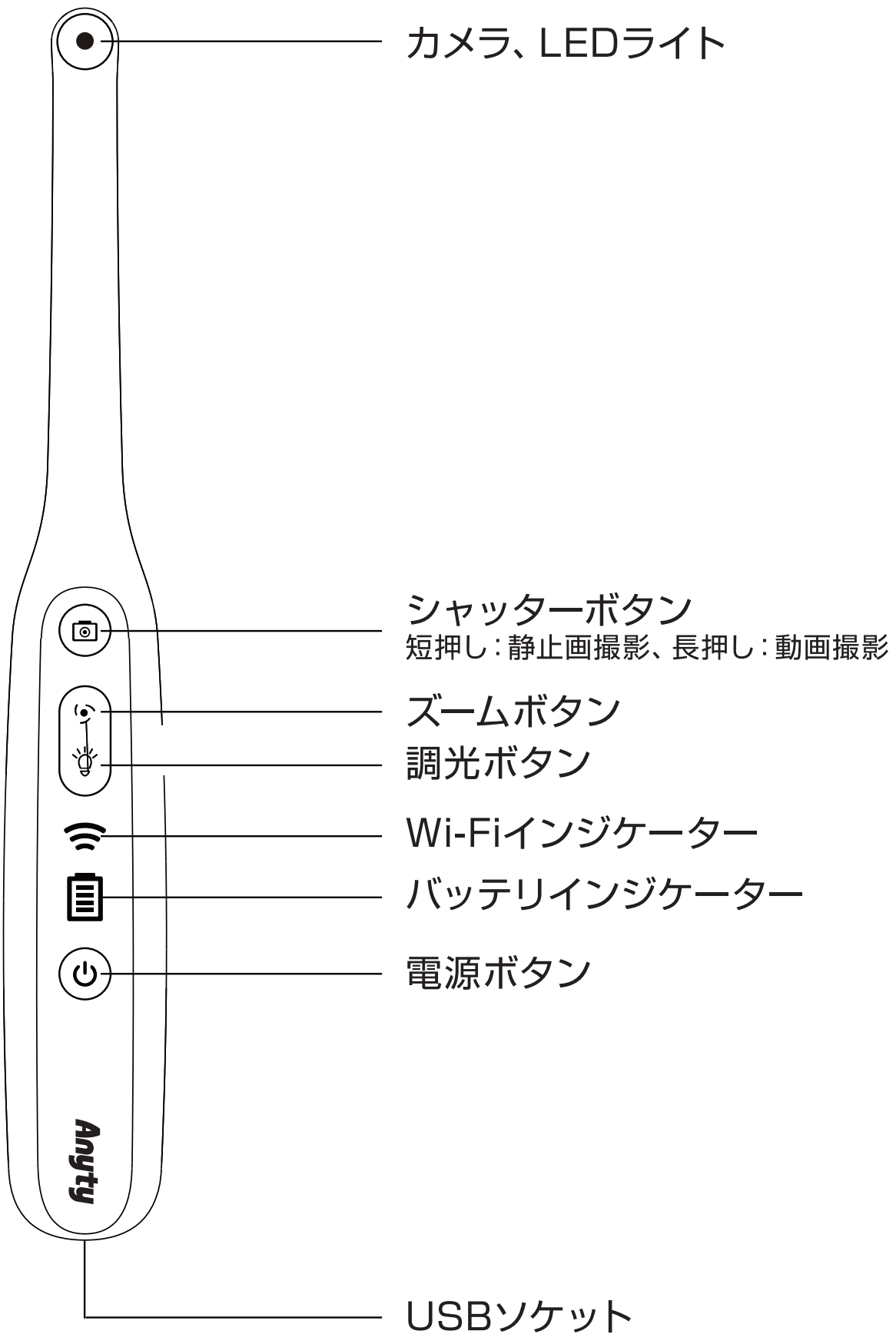


各部の名称

付属品

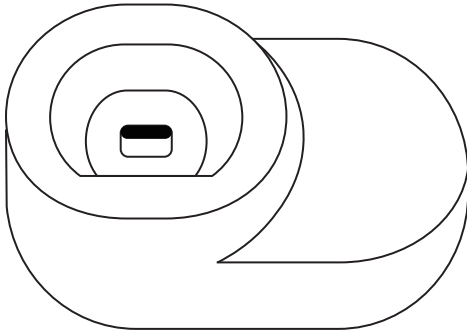

台座

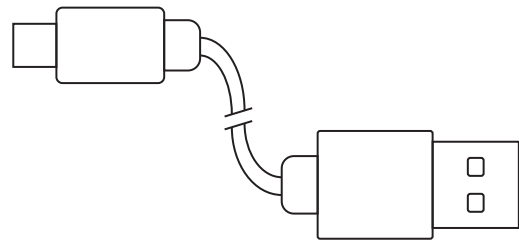

USBケーブル

使用方法

ご使用の前に

この取扱説明書の内容は

iOS：アプリバージョン1.0.25(85)、iOS16.7.8

Android：アプリバージョン1.0.092、Android 9

の仕様に基づいて構成されています。

今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用方法・つづき

本製品には専用のアプリが必要です。



左記QRコードを読み取り、Webページにアクセスします。使用するデバイスのOSを選択し、アプリをダウンロード、インストールしてください。または各アプリストアで「ANESOK」と検索し、アプリをダウンロード、インストールしてください。

※Sup-Anesokではなく、ANESOKをダウンロードするようにしてください。

充電する

付属のUSBケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。もう一方のプラグを本体のソケットに接続してください。

- 充電が開始されるとバッテリインジケータが赤点灯します。
- 充電が完了するとバッテリインジケータが緑点灯します。
- 充電は約2.5時間で完了します。

また、付属品の台座を使用しての充電も可能です。

1. 本体を台座のUSBプラグに接続してください。
2. 台座側面のUSBソケットにUSBケーブルのプラグを接続してください。
3. USBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

使用方法・つづき



使用する

※ご使用前に

別売りのビニールカバーをカメラの先端に装着することで、汚れなどから製品を保護できます。（製品はビニールカバーを使用せずにご利用いただけます）

ビニールカバーは使い捨てです。使用後は必ず廃棄してください。

⚠ 注意

ご使用中はカメラ先端部が熱くなりますが、故障ではありません。また、観察時に使用するビニールカバーにも影響はございません。

1. 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。
電源が入るとWi-Fiインジケータが点灯し、その後点滅します。本体先端のLEDが点灯します。
※電源を入れた後、Wi-Fiインジケータが点滅しますが、接続先を探している状態です。
※接続が完了するとWi-Fiインジケータは点灯します。

使用方法・つづき

2. スマートフォンのWi-Fi設定画面を開きます。

ネットワーク一覧より「ANESOK」から始まるネットワークに接続してください。

※製品本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。

※表示されない場合は製品本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。

※接続が上手くいかない場合は、スマートフォンを機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。

iOSの例



Androidの例




3. 接続完了後、「ANESOK」アプリを開きます。


使用方法・つづき

4. 「ローカルネットワークデバイスの検索および接続」を求められた場合は「許可」を選択します。

iOSの例

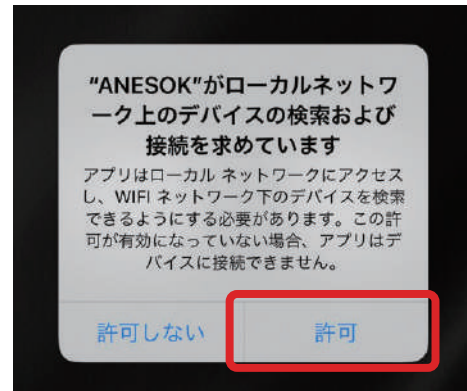


5. 接続完了後、アプリのカメラボタンを押してください。
(自動的に切り替わりません)

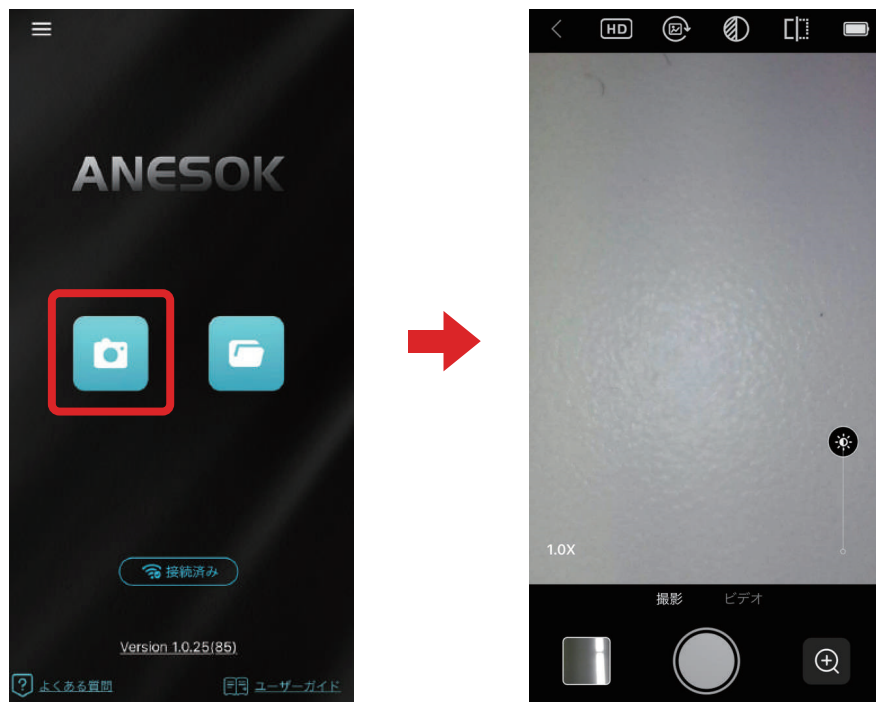

6. カメラ映像を見ながら口腔内を観察してください。
7. 使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。
※機内モードにした場合は、機内モードを解除してください。

使用方法・つづき

カメラ映像画面の説明

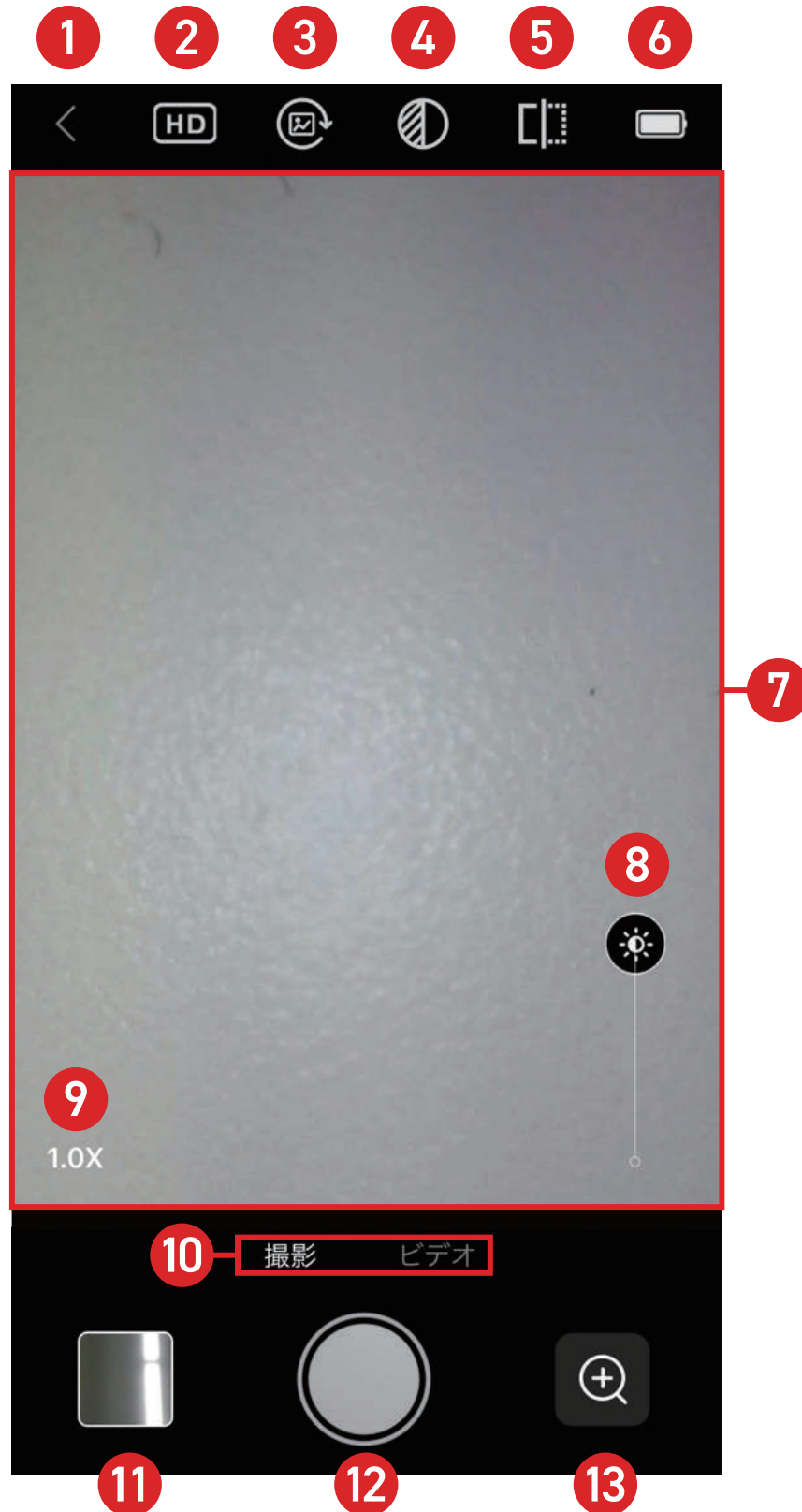


使用方法・つづき

1	トップ画面に戻る
2	静止画/動画の解像度を変更します
3	90°回転
4	白黒/カラー切替
5	2画面表示…リアルタイム映像と撮影画像を2画面表示します
6	本体バッテリー残量
7	リアルタイム映像
8	調光…上下にスライドさせ、明るさを調整できます
9	倍率表示
10	写真/ビデオ 切替
11	アルバム
12	撮影
13	倍率切替(1.0倍→1.5倍→2.0倍)

使用方法・つづき

トップ画面の説明

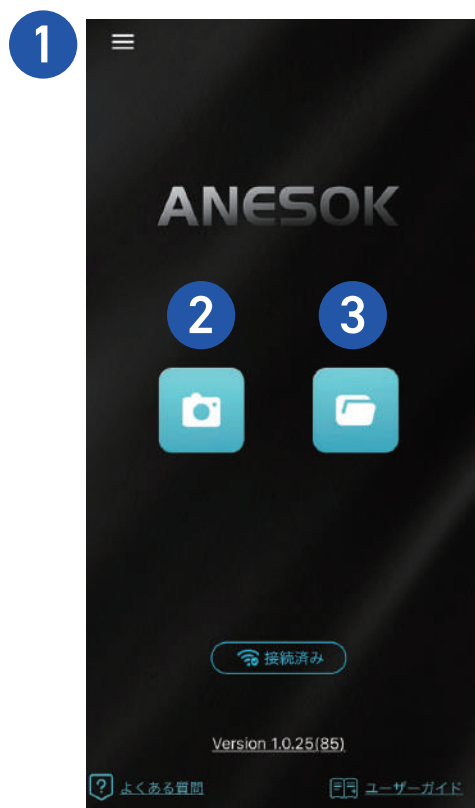

1	設定(言語設定)
2	撮影画面
3	アルバム

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。

●レンズ含む先端部：水洗い可能です。

●先端部以外：水洗い不可です。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL : product-support@3rrr-hd.jp

仕様

商品名	口腔内カメラ
型番	3R-ORL01
サイズ (約)	212×28×25.4mm
重量 (約)	58g
材質	ABS+PC(本体)、シリコン (持ち手部)
動作時間 (約)	2 時間
充電時間 (約)	2.5 時間
入力電圧 / 電流	5V/0.5A
撮像素子	CMOS 1/4
カメラ画素数	200 万画素 ※ただし、スマホなどの端末で見る場合は 30 万画素相当です
バッテリー容量	850mAh
防水防塵	IP67(レンズ部のみ)
付属品	USB ケーブル、台座 ※AC アダプタは付属していません

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>

第1版 2024.6.28