



KOOLMASK 電動マスク



2020.09.16

第1版

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。


⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- この製品には、磁石が含まれていますので、医療機器に影響を与えるおそれがあります。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- 換気の悪い環境で使用しないでください。
- 航空会社の事前承認がない限り、飛行中にこの製品を使用しないでください。
また、機内への持ち込みを許可されない場合があります。
- 他のユーザーと使いまわしをしないでください。
- 指や鋭利な物をファンに突き刺したりしないでください。
- この製品は耐水性または防水性ではありません。
雨、雪、汗、その他の液体や湿気が侵入すると、火災・感電の原因となります。

各部の名称

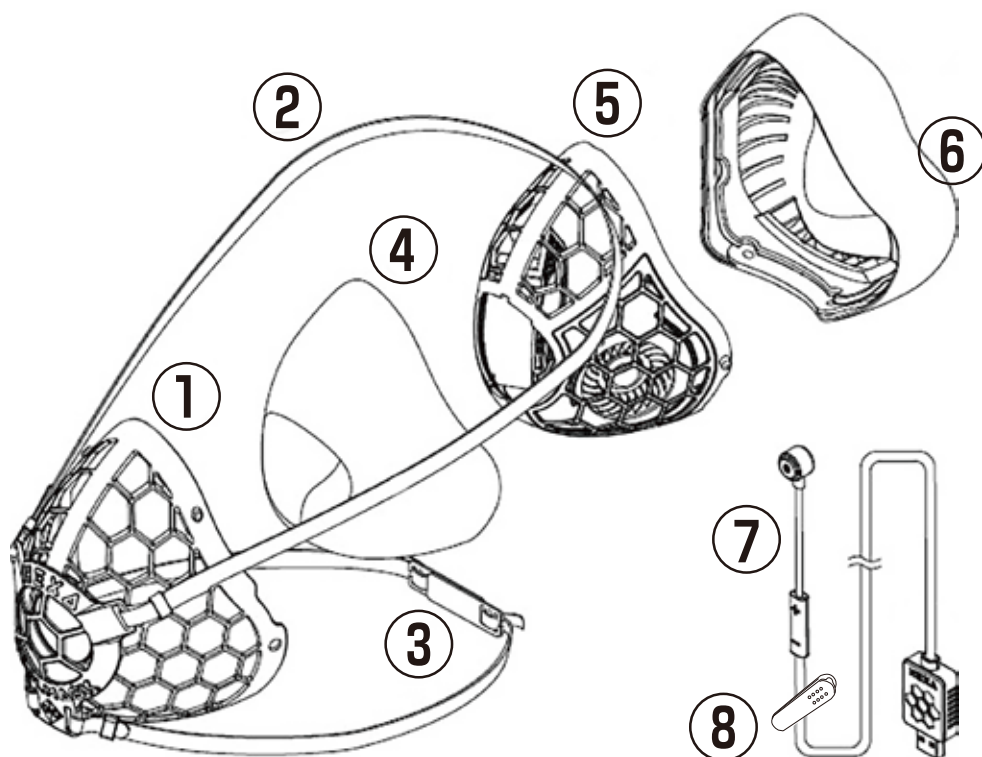

- ①フィルターカバー
- ②ヘッドストラップ
- ③ネックストラップ
- ④フィルター

- ⑤インナーマスク
- ⑥フェイスシール
- ⑦コントロールユニット
- ⑧ケーブルクリップ

※動作させるには別売、もしくはお手持ちの5V / 2.1A以上のUSB A出力を備えた電源が必要です。

【モバイルバッテリー使用時の動作時間目安】
5000 mAh容量で約2～6時間動作します。


※ファンの回転速度による

組立方法

フィルターは、あらかじめセットされ、組み立てられた状態で出荷されています。
フィルターを外す際は、組立方法の逆手順で行ってください。

1. フィルターカバーにフィルターを合わせる

②フィルターの中央開口部で①フィルターカバーを合わせ、しっかりと取り付けられていることを確認します。

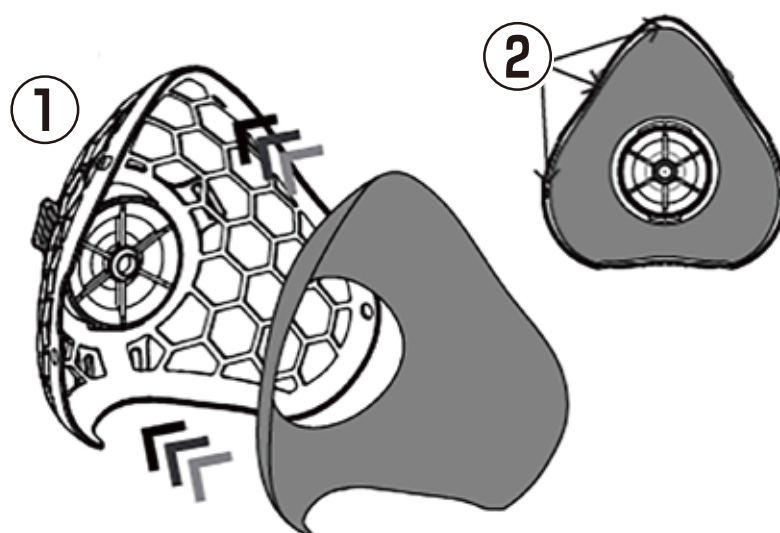

※フィルターが損傷している、穴が開いている、化学物質や生物学的因子（細菌など）の付着、血液および体液で汚染されている場合は使用しないでください。

※フィルターが適切に取り付けられていない限り、使用しないでください。


※フィルターは、40時間使用した後、またはパッケージを開封してから7日後のいずれか早い場合に交換してください。

2. 1とインナーマスクを合わせる

1とインナーマスクを形を合わせて押し込み、インナーマスクの①ロックピンをフィルターカバーの②ロックホールから出して合わせてください。

※ロックピンは左右1箇所ずつあります。


※フィルターが折れていたり、隙間が空いていないことを確認してください。

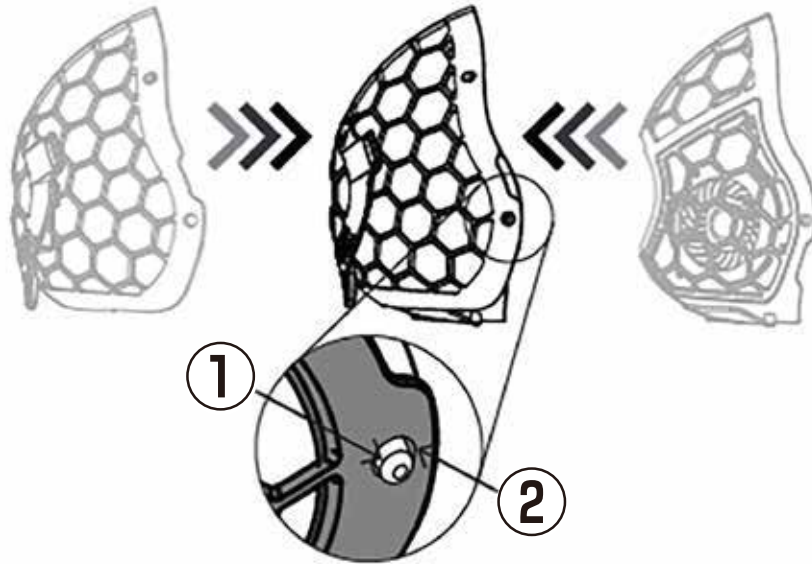

3. 2とフェイスシールを合わせる

2で組み立てた下部の2つの①ロックピンとフェイスシールの②ロックホールを最初に合わせてから、2がフェイスシールの溝に入るように他のロックピンとロックホールを合わせてフェイスシールを装着させます。


※ロックピンは全部で6箇所あります。

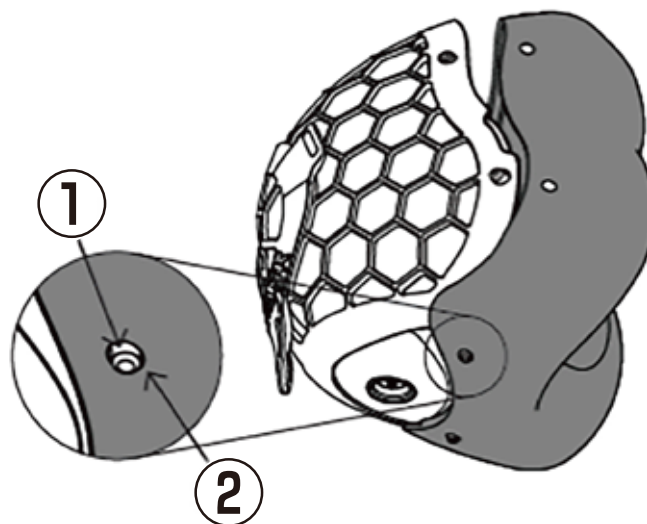

装着方法

※この製品を使用する前に、毎回マスクが顔に適切にフィットしていることを確認してください。

※マスクが顔にぴったり合うようにストラップを調整してください。

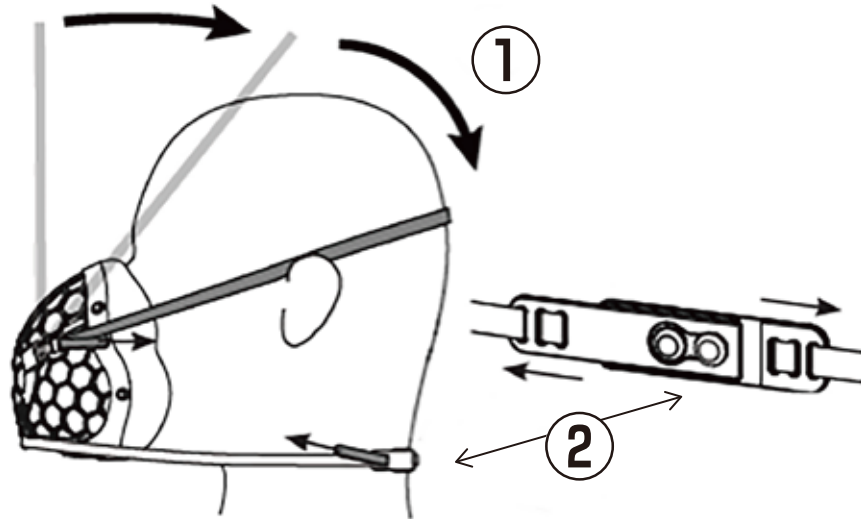


- ① マスクを片手で持ち、鼻と口の位置が合うように仮置きし、反対側の手でヘッドストラップを耳の上でかけます。
- ② ネックストラップを首の後ろ側にもっていき、固定具の突起を穴に入れてスライドさせて固定します。
- ③ マスク表面を両手で覆ってください。
- ④ 深く、素早く吸い込み、空気圧がマスク内部で感じられるかを確認します。

※空気圧を感じない場合は、マスクの位置やストラップの長さ・位置調整し、再度③④を行います。空気圧を感じない場合は、再度組み立てをし直してから①～④を行ってください。

※マスクを過度に顔に押しつけると、不快感やけがの原因となります。


※長い顔の毛、あごひげ、口ひげは、回転するファンに絡まり、怪我をする可能性があります。

使用方法

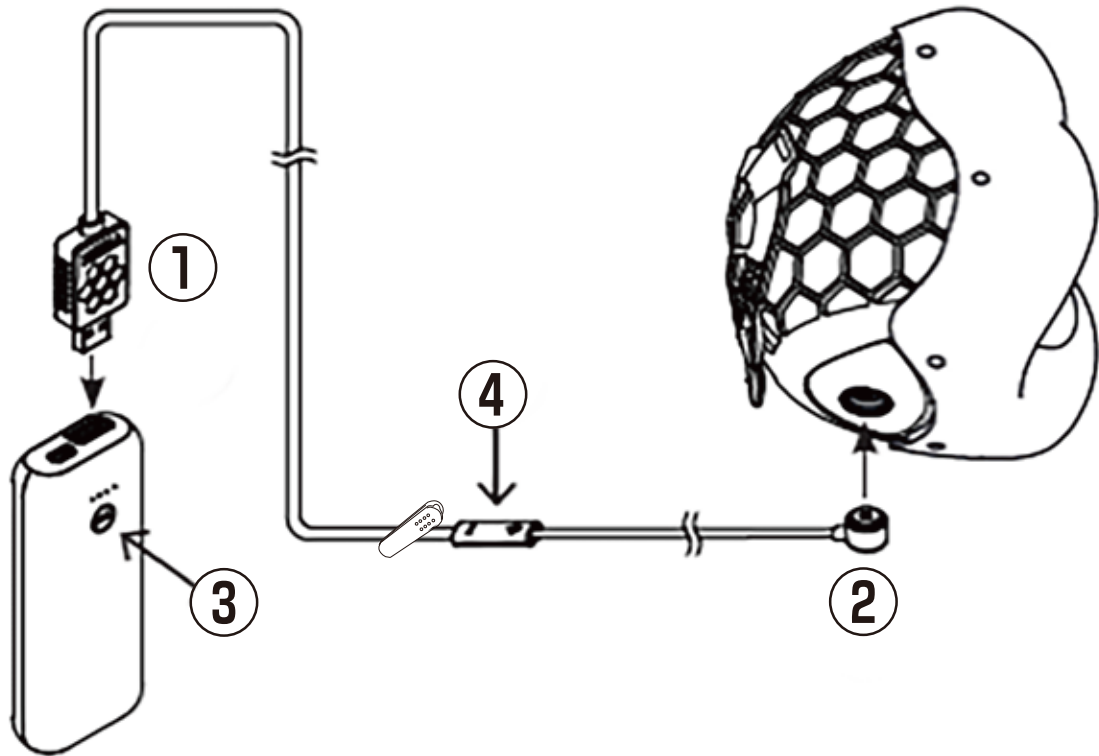

- ①コントロールユニットのUSBプラグをお手持ちのモバイルバッテリー等に差し込みます。
- ②磁気コネクタをマスク下部の取り付け部に接続し、マスクを装着します。
- ③モバイルバッテリーの電源ボタンを押してオンにします。
- ④コントロールユニットの「+」を押して、ファンを動作させます。

- ⑤コントロールユニットの「+」「-」でファンの回転速度を調整します。
「+」を押す毎にファン回転速度が1段ずつ上がっていきます。
「-」を押す毎にファン回転速度が1段ずつ下がっていき、最後はファンが停止します。

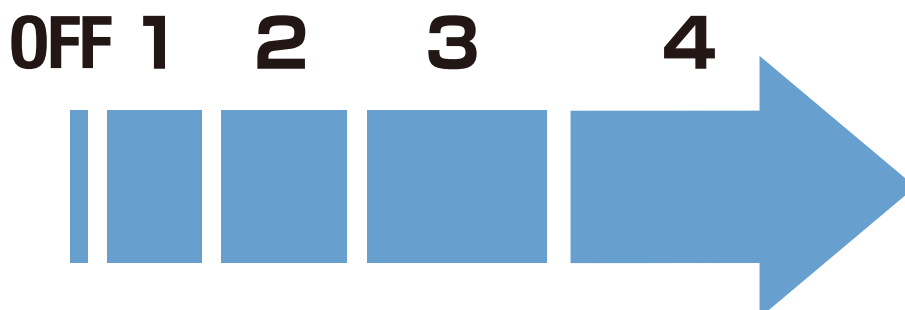

※ファンの回転速度は4段階あります。

- ※使用中、本体から磁気コネクタが外れた場合は、モバイルバッテリーの電源を切るもしくは、コントロールユニットのUSBプラグを抜いてください。コントロールユニットの設定をリセットすることができます。
- ※磁気コネクタが外れやすい場合は、ケーブルクリップが付属しておりますので、服にクリップさせるなどしてご利用ください。
- ※フィルターは、40時間使用した後、またはパッケージを開封してから7日後のいずれか早い場合に交換してください。

マスクの外し方

- ①マスクから磁気コネクタを外します。
- ②ヘッドストラップを外します。
- ③ネックストラップを外します。

※ファンが作動していないときは、この製品を使用しないでください。また、使用中はこの製品を覆わないでください。

※接続しているモバイルバッテリーを充電中の場合は本製品を使用しないでください。

※クレジットカードなどの磁気カードを本製品の近くに置くと、使用できなくなる場合があります。

※1日で8時間以上使用しないでください。

お手入れ方法

フィルターカバー、フェイスシール、インナーマスクは個別に定期的に洗浄してください。

お手入れの際は必ず、マスクからコントロールユニットとモバイルバッテリー等を外してください。

フィルターカバーとフェイスシール

- ・流水で清掃します。
- ・汚れが取れない場合は、水で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

インナーマスク

- ・薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、かたく絞ってからそっと拭きます。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

※インナーマスクを水に浸さないでください。

保管方法

各パーツが完全に乾いたら組み立て直し、日の当たらない風通しの良い場所で保管してください

※クリップなど磁気に反応するような小さなものを近くに置かないようにしてください。ショートし、発煙・発火など火災の原因となります。

製品仕様

商品名	Qurra KOOLMASK 電動マスク
型番	3R-DMK01
入力	DC5V / 2.1A
出力	DC6V、DC8V、DC10V、DC12V
サイズ	約 117.5×100×126mm
重量	約 215g
コントロールユニットのコードの長さ	約 101 cm
動作時間	使用するモバイルバッテリーによる
付属品	KOOLMASK 専用フィルター 4枚（1枚は本体装着済）

オプション（別売品）

商品名: Qurra KOOLMASK 専用フィルター 4枚入り

型番: 3R-DMK02WT

保証期間: ご購入より7日間

販売サイト: ココロミクラブ本店

※交換方法は、【組立方法】を参考にしてください。

企業情報とサポートについて

製品保証：ご購入から3カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX 092-260-8506**

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階